

Anleitung Testkit zur Sammlung von Urin


Material



Urinbecher



UCK-Röhrchen und
Urintransfereinheit

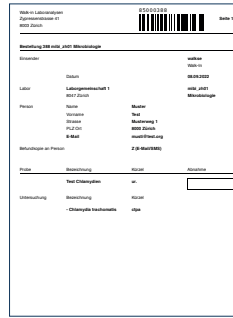

Auftragsformular
Laborgemeinschaft 1

1 Vorbereitung

- Hände waschen.
- Auffangbecher bereitstellen.
- UCK-Röhrchen mit der beschrifteten Etikette und dem Barcode bekleben.



2 Durchführung

- Erststrahl- vom ersten Morgenurin in den Auffangbecher lösen.
- Die Urintransfereinheit mit dem Stäbchen nach unten in den Urin halten. Das UCK-Röhrchen oben in die Urintransfereinheit rein stecken und warten bis das Röhrchen gefüllt ist. (siehe Video auf Website: laboranalysen.ch/shop)
- Die Urintransfereinheit sowie der Auffangbecher wegwerfen.
- Das gefüllte UCK-Röhrchen ca. 8–10 Mal kippen.
- Abnahmedatum unter „Abnahme“ ins Auftragsformular eintragen.

3 Versand

- Rückversand des UCK-Röhrchens mit beiliegendem Auftragsformular in vorfrankiertem Couvert an die Laborgemeinschaft 1.

4 Befund

- Das Resultat erhältst du einfach und bequem innert 3 Tagen per E-Mail und SMS.